

É um kit composto por 2 espátulas, sendo uma para pré-molar e outra para molar, com lados identificados para mesial e distal.

A técnica propriamente dita consiste na pressão contra a parede proximal

Indicações:

- Para obter contatos proximais em molares e pré-molares em resina fotopolimerizável

Contra-indicações:

- O produto não apresenta restrições de uso, porém recomenda-se apenas para fins odontológicos.

Protocolo de Aplicação:

- **Técnica de uso**
 - Após o preparo da cavidade, utiliza-se a matriz de aço ou poliéster, use cunha
 - Colocar a resina na cavidade
 - Adaptar a espátula na caixa proximal, pressionando-a contra a parede da matriz
 - Repetir o procedimento até preencher a caixa proximal
 - Caso se observe a falta de contato, repetir o procedimento aumentando a pressão, forçando novamente a espátula contra a matriz do lado distal ou mesial até, a obtenção do contato na área desejada.
 - Polimerizar pela lateral
 - Pode-se desgastar e ajustar com uma ponta abrasiva ou borracha de silicone em casos de cavidades menores
 - Para o brilho final usar Crystar Past com mini feltro
- **Caixas proximais a nível gengival e sub gengival**
 - Aumentar a base com resina até a distância de 0,50 a 1mm aquém do ponto de contato
 - Utilizar a espátula conforme a técnica apresentada anteriormente

Advertências e Cuidados Especiais:

- Esterilização somente por meio químico ou autoclave
- Não levar à estufa