

Metalux é uma pasta para polimento e brilho em metais.

## Indicações:

- Polimento e brilho em amálgama e metais como: cromo cobalto, níquel cromo, ouro, liga de prata, cobre alumínio e paládio.

## Contra-indicações:

- O produto não apresenta restrições de uso, porém recomenda-se apenas para fins odontológicos.

## Protocolo de Aplicação:

- **Amálgama**  
Após qualquer tipo de acabamento (brocas de 12,30 ou 36 lâminas), dar acabamento fino com Poli I e II e brilho final com Metalux, usando mini-feltro (intra-oral)
- **Metais**  
Após desgaste com pontas diamantadas ou pontas montadas abrasivas, dar acabamento fino com pontas de borrachas. Em seguida, use Metalux com roda de feltro meio duro para brilho final.

**Atenção:** Ao utilizar a Metalux em combinação com outras pastas, deve-se utilizá-las em feltros separados.

## Apresentação:

- Seringa com 2g