

Provi-Gloss é uma pasta para brilho em provisórios

Indicações:

- Para brilho em provisórios
- Pequenos desgastes em prótese total e aparelhos de ortopedia

Contra-indicações:

- O produto não apresenta restrições de uso, porém recomenda-se apenas para fins odontológicos.

Protocolo de Aplicação:

- Desgastar com brocas mini cutt
- Dar polimento com borrachas
- Usar pasta com feltro meio macio
- Trabalhar com baixa rotação sem pressionar muito o feltro
- Umedecer o feltro, se necessário

Cuidados especiais:

- Ao utilizar a Provi-Gloss em combinação com outras pastas, deve-se utilizá-las em feltros separados.
- Não há necessidade do uso de politriz

Apresentação:

- Seringa com 2g